

**Nombre del Producto** COLCHÓN ANTIESCARA CON MOTOR

**Código** CA-001

**Origen** China

**Marca** Blunding


**Descripción**

El Colchón antiescaras esta compuesto de dos partes: Bomba de Aire y Colchón. El Colchón tiene dos globos compensadores por separado. Bajo el control de la Bomba de Aire, cada globo compensador puede tocar distintas partes del cuerpo cada 6 minutos. La fluctuación de los globos compensadores facilita la circulación sanguínea y previene la aparición de úlceras en el paciente que permanece en cama por largo tiempo y cura rápidamente las úlceras existentes.

El equipo va con dos fusibles de repuesto tipo T1A que se cambian fácilmente en la parte Posterior de la bomba de aire.

Incluye kit de parche para reparación.

**\*No Inflamable**  
**\*Libre de látex**

**Especificaciones Colchón**

Solapas adicionales de 50 cm de longitud 50 cm. (Parte superior y parte inferior)

- \* Células Altura: 7 cm / 2,7 "
- \* Material del colchón: EN71 grado médico PVC
- \* Material de espesor: 0,35 mm.
- \* Resistencia al frío: -30 grados
- \* Número de células: 130
- \* Peso soporte: 125 kg +/- 10kg

**Especificaciones Motor**

- \* Electricidad: CA 110 V/220V 50Hz/60Hz
- \* Presión de rango de aire de salida: 50-150 mmHg 4 -6 litros / min
- \* Tiempo de ciclo: 6 min
- \* Carcasa de plástico: Taiwán Chimei ABS

Colgadores ajustables para adaptarse a cualquier tipo de marco de camas de hospital

**Indicación**

Para tratamiento de prevención de úlcera por presión en tratamientos a largo plazo domiciliarios y hospitalarios.

**Medidas**

Colchón : 88cm ancho X 195 cm largo X 7cm de Alto  
 Motor : 13 cm ancho X 25 cm Largo X 9.5 cm Alto

**Composición**

Colchón: EN71 Grado Médico PVC  
 Motor : Plástico ABS

**Color** Beige Claro

| Código de barra | TALLA | CÓDIGO        |
|-----------------|-------|---------------|
|                 | Única | 7801001007950 |

**Envasado** Caja

**Mantenimiento de Producto** Almacenar el colchón en lugar fresco, sin humedad, sin sol directo y gas corrosivos. Guardar en un lugar seco

**Vigencia** Blunding se compromete a sustituir la totalidad del producto por defectos de fabricación, durante tres meses posterior a la fecha de venta.

**Garantía**

El producto esta diseñado para ser usado por una persona. Blunding ha efectuado los esfuerzos utilizando la tecnología actual para obtener la máxima funcionalidad, resistencia, durabilidad y comodidad. Sin embargo, no existe certeza absoluta de que se evitarán lesiones durante el uso de este producto. Blunding se reserva el derecho de modificar este producto con el fin de mantener su mejora continua.

Al recibir este producto usted declara conocer los fines para los cuales fue diseñado.

**Certificación y Registros**

Certificación de Norma ISO-9001/2008 Sección 8.2.3 N° CL13/20100668  
 Registro FDA N° 9104922  
 Registro del Instituto Nacional de Salud Pública N° EDM 198/14

